

Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie der Technischen Universität München	02 PL 002 Checkliste Probentransport Einsender OP	ID	222
		Path.ID	02 PL 002
		Version	002/07.2023
		Seite	1 von 1

Checkliste Pathologie – Probentransport OPERATIONSPRÄPARATE

- Ausreichend großes und geeignetes Probengefäß (siehe auch Beiblatt) wählen
- 3,5-4%ige (w/v) mit PBS neutral gepufferte Formaldehydlösung** in ausreichendem Maße bis knapp unter den Deckel auffüllen
(Volumenverhältnis von Gewebe zu 3,5-4%iger Formaldehydlösung 1:10)
- Deckel vollständig zugeschraubt, Gefäß von außen sauber?
- Patientenetikett auf dem Einsendegefäß (**NICHT NUR** auf dem Deckel)
- Einsendeschein vollständig ausgefüllt (Untersuchungsmaterial angekreuzt; Name des zuständigen Arztes in leserlicher Schrift sowie Telefonnummer, klinische Angaben vollständig, **NEOADJUVANTE THERAPIE?**)?
- Infektiöses Material gekennzeichnet?
- Einsendeschein sauber und hygienisch
- Ggf. Proben nochmals in Klarsichtbeutel / Kreuzbodenbeutel geben (Einsendeschein **SEPARAT** beilegen, **NICHT DIREKT** zum Probengefäß)

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich zwischen 8-16 Uhr zur Verfügung: 089 / 4140 - 4168.

Bitte diese Checkliste und das Beiblatt (02 PL 004) unbedingt beachten! Unsachgemäß verpackte Proben MÜSSEN von unseren Mitarbeitern aus Sicherheitsgründen zurückgeschickt werden!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Erstellt / geändert: Kreitmair, Erna	Inhaltlich geprüft : Ekici, Kübra	Freigegeben: Remke, Marianne	QM Freigabe: Kreitmair, Erna
Datum: 24.07.2023	Datum: 27.07.2023	Datum: 27.07.2023	Datum: 27.07.2023